

# snúza<sup>®</sup>

## PICO

### Smart Wearable Monitor

## Inteligentní přenosný monitor

### MANUÁL S INSTRUKCEMI

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE INSTRUKCE**



## DŮLEŽITÉ

**Snuza Pico je pomůcka při péči o dítě, nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k určení diagnózy ani jako prevence nebo přístroj na monitoring nemoci, zranění nebo handicapu. Nevhodný pro použití při společně spících dětech**

Snuza je registrovaná ochranná známka



**Snuza International (Pty) Ltd**

Unit 11 Roeland Square

Roeland Street

Kapkaupunki 8001

Jižní Afrika



**FCC ID: 2AI3601**

**IC: 21736-01**

Vyrobeno v Jižní Afrika

Patentováno

## OBSAH

1.	<b>DŮLEŽITÉ - PŘEČÍST JAKO PRVNÍ!</b> .....	1
2.	Úvod .....	3
3.	Bezpečnostní opatření a kontraindikace .....	5
4.	Identifikace částí .....	6
5.	Průvodce rychlým startem .....	8
6.	Montáž na plenu .....	10
7.	Montáž Snuza Pico .....	10
8.	Manipulace .....	11
	8.1 Připnutí na plenu .....	11
	8.2 Zapnutí / vypnutí .....	12
	8.3 Pauza .....	12
	8.4 Nabíjení .....	12
	8.5 Světelné indikátory .....	13
	8.6 Světelný indikátor pohybu .....	14
	8.7 Bluetooth s nízkou energií .....	14
	8.8 Indikátory baterie .....	15
	8.9 Indikátory alarmu .....	15
	8.10 Indikátory nabíjení .....	16
	8.11 Oblékání .....	16
9.	Upozornění probuzení .....	17
10.	Baterie .....	17
	10.1 Indikátor baterie .....	17
	10.2 Životnost baterie .....	18
11.	Obsluha / údržba .....	18
	11.1 Likvidace .....	18
	11.2 Čištění a skladování .....	18


12. Řešení problémů .....	19
13. Zřeknutí se odpovědnosti .....	19
14. Garance.....	20
15. Informace.....	20
16. Technické parametry.....	22

## 1. DŮLEŽITÉ - PŘEČÍST JAKO PRVNÍ!

Snuza Pico je navržen tak, aby se dala připnout na plenku během spánku, takže frekvence pohybu břicha dítěte, tělesná teplota a pozice těla mohou být neustále monitorovány a informace jsou sdíleny do Vašeho smart zařízení přes Bluetooth Low Energy technologii.

**\*\* Každé zařízení je limitováno na 4 uživatele, kteří mohou být registrovaní na jedno inteligentní zařízení.**

**\*\* Pouze jedno zařízení může být připojeno na Snuza Pico v jednom čase.**

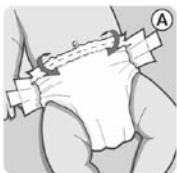

### VŽDY:

Používejte správnou velikost plenky pro zajištění správnosti upevnění Snuza Pico na plence.



Sklopte horní část pleny před připojením Snuza Pico, abyste zajistili pevnou přilnavost. Přitažením obou stran pleny zabezpečíte přilnavost a bezpečnost upevnění plenky kolem břicha.

Chcete-li upevnit Snuza Pico, zvedněte přední páčku abyste uvolnili klip. Umístěte klip kolem složené plenky do plného dosahu klipu. Zavřete klip a zaklapněte přední páčku. Ujistěte se, že klip je správně uzavřen a dobře sedí na plně.

Pro zahájení sledování stiskněte tlačítko pro zapnutí. Zvukový signál naznačuje, že Snuzza Pico se zapnul. Přihlaste se do aplikace na svém inteligentním zařízení. Snuzza Pico se synchronizuje s aplikací na inteligentním zařízení a data se zobrazí na hlavní obrazovce. (Poznámka: stiskněte na svém inteligentním zařízení tlačítko obnovení, pokud nejsou synchronizovány automaticky.)

Pro přesné informace o poloze přejděte na stránku s nastaveními v aplikaci a uveďte, kde je monitor Snuzza Pico připojen na plenu. Ujistěte se, že Snuzza Pico sedí přímo na plence.



Vždy dodržujte výše uvedený postup, abyste se ujistili, že břišní pohyb dítěte je monitorován.

#### **POZNÁMKA:**

Se Snuzza Pico zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození klipu a vždy ho uložte do nabíjecí základny během cestování.

## 2. ÚVOD



### **Účel použití:**

Snuza Pico je přenosný monitor břišního pohybu, který bezpečně a pohodlně snímá pohyb břicha Vašeho dítěte během spánku.

### **Určeno pro uživatele:**

Toto zařízení je určeno k obsluze péči o dítě. Chůva musí ovládat pokyny pro bezpečnost z uživatelské příručky.

### **Prostředí:**

Bezpečí domova

Snuza Pico bezpečně a pohodlně sleduje pohyb břicha vašeho dítěte během spánku, aby poskytl možnost včasného zásahu v případě, že se pohyb břicha zastaví.

Snuza Pico by měl být připnutý na plenku Vašeho dítěte s přesností. Nejsou potřeba žádné kabely, dráty, senzorové podložky nebo externí napájení.

Snuza Pico není vhodné používat při spolu spících dětech.

Snuza Pico dokáže rozpoznat i nejmenší pohyb břicha a upozorní Vás, pokud se pohyb břicha zastaví na 20 vteřin. Snuza Pico bude nejprve jemně vibrovat po 15 sekundách ve snaze probudit dítě.

Pokud se vibracemi podaří probudit dítě a vyvolat dýchání, Snuza Pico bude pokračovat ve sledování pohybu. Po třech událostech s vibracemi Vás funkce Upozornění probuzení upozorní na skutečnost, že břišní pohyby dítěte se zastavily třikrát po dobu 15 sekund. Výstraha Probuzení se vyznačuje krátkým pípnutím a blikáním žlutého indikátoru pohybu (1) každé 2 sekundy. Monitorování bude pokračovat, i když je aktivováno Upozornění probuzení, ale bude vyžadováno, aby ošetřující pracovník dítě sledoval. Výstražný alarm probuzení lze obnovit krátkým vypnutím a opětovným zapnutím zařízení. Funkce Upozornění probuzení může být zakázána v aplikaci smartphonu. Každých 15 sekund Upozornění probuzení budou zaznamenávány v aplikaci telefonu.

Snuza Pico bude vždy měřit pozici těla Vašeho dítěte a jeho tělesnou teplotu.



### 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A KONTRAINDIKACE

- Toto zařízení není určeno k prevenci nebo monitorování nemoci nebo stavu, jako je obstrukční apnoe.
- Pohyb z vnějšího prostředí, jako je například vození dítěte v kočárku, cestování ve vozidle nebo v letadle může být zaznamenán snímačem Snuza Pico. Výsledky Snuza Pico mohou ovlivnit zdroje pohybu zaznamenané z externího prostředí.
- Monitorované dítě musí spát ve své vlastní postýlce, kde monitor nebude moci zaznamenávat břišní pohyb druhého dítěte uloženého v sdílené postýlce a nebude zaznamenávat tyto pohyby.
- Rádiové vysílače, jako jsou mobilní telefony, audio a video dětské monitory, bezdrátové telefony, vysílačky, bezdrátové směrovače atd. mohou ovlivnit schopnost monitoru zaznamenat pohyb. Monitor by neměl být umístěn do vzdálenosti méně než 2 metry od ostatních přenosných zařízení nebo elektrických kabelů.
- Žádná modifikace tohoto zařízení není povolena.
- Jedno zařízení je doporučeno používat pouze pro jedno dítě.
- Malé části, které se z nepravděpodobného důvodu oddělily, mohou mít za následek vzniknutí nebezpečí udušení.
- V případě, že Vaše dítě je citlivé na pokožce, pokud se zařízení dostane do kontaktu s pokožkou, viz část 8.3. Pokud citlivost pokožky přetrvává, kontaktujte nás na adrese [www.snuza.com](http://www.snuza.com).
- Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat, škůdců a jiných dětí, protože poškození přístroje by mohlo způsobit, že nebude fungovat tak, jak je určeno.
- Nevkládejte nic do otvoru určeného pro přenos zvuku (5).
- Zajistěte, aby se žádná tekutina nedostala do otvoru určeného pro přenos zvuku.
- Nepoužívejte nepřiměřenou sílu na ohnutí / otevření / zavření svorky (11).

## 4. IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZAŘÍZENÍ



### Přední strana

- 1 - Kontrolka baterie
- 2 - Kontrolka pohybu (dechové frekvence)
- 3 - Kontrolka alarmu
- 4 - Kontrolka oznámení a bluetooth
- 5 - Otvory reproduktoru
- 6 - Vypínač / tlačítko režimu
- 7 - Páka klipu



### Zadní strana

- 8 - Bezkontaktní senzor
- 9 - Kolíky nabíjení
- 10 - Teplotní senzor
- 11 - Klip



## 5. IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZAŘÍZENÍ

### Krok 1: Nabijte svůj Snuzza Pico

Připojte napájecí kabel do nabíjecí skříňky. Ujistěte se, že Snuzza Pico sedí v nabíjecí skříni a zavřete víčko krytu. Nechte svůj Snuzza Pico nabíjet 1 hodinu.

### Krok 2: Stáhněte si aplikaci Snuzza Pico pro připojení

Snuzza Connect je dostupná na iOS a Android.

Viz iOS průvodce aplikací: <http://www.snuza.com/manuals/>

Viz Android průvodce aplikací: <http://www.snuza.com/manuals/>

Minimální požadavky na inteligentní zařízení:

- Musí podporovat:
- Bluetooth 4.0
  - Apple zařízení: iOS 8.0 nebo novější
  - Android zařízení: Android 4.4 nebo novější

### Krok 3: Registrace Snuzza Pico

Navštivte [connect.snuza.com](http://connect.snuza.com). Vyberte možnost registrace nového uživatele a vyplňte požadovaná políčka.

Potvrzovací e-mail bude odeslán na Vaši vybranou e-mailovou adresu.

Po potvrzení se dostanete na portál Snuzza. Přejděte na kartu "Registrace zařízení" v nabídce.

Vložte sériové číslo Vašeho zařízení a vyplňte požadovaná pole s podrobnostmi. Sériové číslo se nachází na zadní straně Snuzza Pico nebo na obalu Snuzza Pico.

### Krok 4: Připevnění Snuzza Pico

Přeložte okraj pleny.

Zvedněte klip pro uvolnění a umístěte Snuzza Pico na plenu Vašeho dítěte. Ujistěte se, že je klip správně zavřený po umístění.

### **Krok 5: Zapněte Váš Snuzo Pico & zahájení monitorování**

Zapněte Snuzo Pico zatlačením tlačítka pro zapnutí dokud neuslyšíte startovací zvuk a všechny světelné indikátory nezačnou současně blikat.

Okamžitě po počáteční sekvenci indikátor baterie začne blikat zeleně, což bude znamenat, že je baterie plně nabitá.

Synchronizujte Vaše inteligentní zařízení se Snuzo Pico pouhým stisknutím tlačítka pro obnovení na obrazovce aplikace. Nyní můžete začít monitorovat Vaše dítě přes Váš telefon.

### **ZÁKLADNÍ FUNKCE SNUZO PICO**

Světlo pro identifikaci pohybu začne blikat vždy když zaznamená pohyb.

Pokud během 15 vteřin není zaznamenán žádný pohyb, Snuzo Pico začne vibrovat pro vzbuzení dítěte.

Pokud během následujících 5 sekund není zaznamenán pohyb, Snuzo Pico spustí zvukový alarm.

### **ZÁKLADNÍ FUNKCE SNUZO CONNECT APLIKACE**

Snuzo Connect aplikace je navržena tak, aby Vám přinášela informace o frekvenci dechu dítěte pozici těla, teplotě pokožky, detekci pádu, úroveň baterie a upozorní Vás pokud je klip na Snuzo Pico otevřený. Přizpůsobte si své upozornění podle sebe v aplikaci.


Upozornění v aplikaci mohou být zamítnuty pohybem zleva doprava.

Nezahrnuje to frekvenci pohybu břicha a detekci pádu. Tato upozornění mohou být zrušena stisknutím tlačítka pro zapnutí na zařízení.

Ujistěte se že Váš smartphone je připojen k aplikaci aby jste dostávali veškerá oznámení a upozornění.

## 6. PŘIPEVNĚNÍ NA PLENU

**Důležité:** Správné upevnění pleny je důležité pro správnou funkci Snuza Pico. Vrchní tenká část pleny musí být přeložena přes hrubší část plenky předtím, než je plenka upevněna (část, ve které bude Snuza Pico připevněná). Plenka by měla pohodlně sedět na dítěti s vrchním okrajem pleny těsně pod dětským pupíkem. Volně připevněná plenka způsobí, že monitor ztratí kontakt s dítětem a vyvolá planý poplach. Velmi "plná" nebo mokrá plenka může také způsobit ztrátu kontaktu monitoru s dítětem. Pokud dítě spí na své straně, Snuza Pico by měl být umístěn mimo od centra pupíku a matrace.

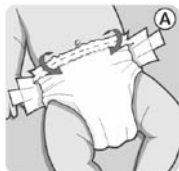

## 7. MONTÁŽ SNUZA PICO

Při připojování monitoru Snuza Pico byste měli položit prsty mezi plenu a pokožku dítěte. Ujistěte se, že monitor připínáte na plenu v dostatečné vzdálenosti od pokožky dítěte, aby nedošlo k ublížení dítěti při zaklapnutí klipu.

Otevřete klip Snuza Pico do plného rozsahu. Uvolníte tím sponu do plného rozsahu. Umístěte monitor přes složené plenky do plného rozsahu spony. Zavřete klip a zatlačte blokovací páčku tak, jak je to zobrazeno zde:

Ujistěte se, že je Snuza Pico v kontaktu s dětským bříškem v oblasti pupku, ačkoli blíž k bokům může vyhovovat různým spánkovým pozicím.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby děti spali na zádech, pokud lékař neřekne jinak: <http://www.who.int/en/>

## 8. MANIPULACE

### 8.1 Připnutí na plenu

Při připevňování Snuzy Pico byste měli položit prsty mezi plenu a pokožku dítěte. Ujistěte se, že monitor připínáte bezpečně na plenu a v bezpečné vzdálenosti od pokožky dítěte, abyste při připínání nezranili děťátko.

Otevřete klip Snuzy Pico do plného rozsahu. Uvolníte tím sponu do plného rozsahu. Umístěte monitor přes složenou plenu do plného rozsahu spony. Zavřete klip a zatlačte blokovací páčku tak, jak je to zobrazeno zde:



Ujistěte se, že je Snuzy Pico v kontaktu s dětským břichem v oblasti pupíku, ačkoli blíže k bokům může vyhovovat různým spánkovým pozicím.

Umístěte na břicho u dětí spících na zádech.

Umístěte na boční stranu břicha u dětí spících na bříšku.

Snuzy Pico má zabudovaný alarm, který indikuje, zda byl klip otevřen během používání. Dříve, než se spustí alarm, Snuzy Pico bude pomalu pípat po dobu 7 sekund, aby Vás upozornil, abyste ho vypnuli nebo aktivovali funkci pauzy. Pokud klip zůstane

otevřen po dobu dalších 3 sekund, aktivuje se funkce Clip Open Alarm.

## 8.2 Zapnutí / vypnutí

Snuza Pico může být zapnutý krátkým stisknutím tlačítka pro zapínání (6) a pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko pro zapínání (6) na 2 sekundy. Uslyšíte zvuky zapnutí a vypnutí (viz bod 8.5.). Alternativně může být Snuza Pico zapnutý a vypnutý přímo z aplikace (pokud tato možnost byla nastavena přímo v nastavení aplikace). To Vám umožní pohodlné zapnutí, pokud jste na to zapomněli a už připevnili monitor k plence, aniž byste rušili své dítě.

## 8.3 Pauza

Snuza Pico byl navržen tak, aby sledoval pohyb dítěte, teplotu pokožky a pozici těla během spánku. Abyste zabránili falešným poplachům během doby, kdy Vaše dítě nespí (během kojení, výměny pleny atd.), Funkce "Pozastavit" Vám umožní dočasně pozastavit sledování, které je uživatelem nastavitelné (v aplikaci) v čase, například během kojení nebo výměny pleny. Tato funkce pozastavení může být aktivována přímo z aplikace stisknutím tlačítka "Pozastavit".

## 8.4 Nabíjení

Pouzdro na přenášení Snuza Pico (12) je současně napájecí nabíječka, která dobíjí zabudovanou baterii tak, že se monitor Snuza Pico jednoduše umístí do přenosného pouzdra.




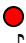


## 8.5 Světelné indikátory

### Spouštěcí a vypínací sekvence

#### Uvedení do provozu pomocí tlačítka pro start

Když je Snuza Pico zapnutý pomocí tlačítka napájení (6), kontrolky (1, 2, 4, 5) budou blikat v pořadí zleva doprava a následuje startovací tón. Bezprostředně po startovacím tónu indikátor stavu baterie (2) bude blikat, aby signalizoval stav baterie při jejím zapnutí. Indikátor baterie má následující význam:

	Zelená	Baterie je plně nabitá
	Žlutá	Baterie je slabá, ale vydrží ještě dalších pár hodin
	Červená	Baterie je velmi slabá a měla by být nabitá
	Červená a následně tón vypnutí	Baterie je vybitá a Snuza Pico se automaticky vypne. Nabíjejte ihned.

#### Uvedení do provozu pomocí aplikace

Když je Snuza Pico zapnutý pomocí aplikace, nezazní žádný zvukový tón, ale obvykle se vyskytne blikající sekvence běžného indikátoru spuštění.

Informace o bateriích se zobrazují na obrazovce aplikace, takže není třeba sledovat baterii během dálkového spuštění.

#### Vypnutí pomocí tlačítka




když je Snuza Pico vypnut pomocí tlačítka, kontrolky začnou blikat v pořadí zprava doleva, po kterém následuje vypínací tón.

### Vypnutí pomocí aplikace

když je Snuza Pico vypnut pomocí aplikace, nenásleduje žádná zvuková signalizace vypnutí, ale ukáže se typická sekvence blikajících indikátorů pro vypnutí.




#### 8.6 Světelný indikátor pohybu

Světelný indikátor pohybu (1) zasvítí, když zaznamená pohyb:-

	Zelená	Zaznamenán silný břišní pohyb
	Žlutá	Zaznamenán slabý břišní pohyb
	Červená	Zaznamenán velmi slabý břišní pohyb

#### 8.7 Bluetooth Low Energy

Světelný indikátor Bluetooth (4):

	Modře	Zasvítí modře každé 2 sekundy pokud je připojen na Váš smartphone / tablet
	Růžovo	Zasvítí na růžovo každé dvě sekundy během pauzy
	Bliká růžovo	Bliká 6krát hned po spuštění, což naznačuje, že na serveru je důležité upozornění, které vyžaduje Vaši pozornost. Tuto důležitou zprávu zobrazíte přihlášením se do svého účtu na portálu Snuza Connect ( <a href="http://connect.snuza.com">connect.snuza.com</a> )

## 8.8 Indikátory baterie

Při spuštění - jak bylo vysvětleno výše v sekci "Spouštěcí a vypínací sekvence".

**Pokud je úroveň nabití baterie nízká (když je Snuza Pico zapnutý)**

Světelný indikátor baterie bude blikat červeně každých 5 sekund a bude pípát dvakrát každých 60 sekund.

**Pokud je úroveň baterie kritická (když je Snuza Pico zapnutý)**

Světelný indikátor baterie bude blikat červeně každých 5 sekund a pípát každých 10 sekund.

**Když se nabíjí**

Během nabíjení bude světelný indikátor baterie blikat zeleně.

Když je nabíjení ukončeno, světelný indikátor baterie na Snuza Pico bude mít konstantní zelenou barvu.

## 8.9 Indikátory alarmu

**Dýchání se zastavilo** - Snuza Pico spustí alarm a současně začne blikat světelný indikátor (4). V aplikaci bude také znít alarm.

**Volný pád** - Snuza Pico spustí alarm a současně začne blikat světelný indikátor (4). V aplikaci bude také znít alarm.

**Systémová porucha** - Snuza Pico bude vydávat nízko frekvenční alarm na zařízení a v aplikaci.

**Klip (7) alarm při otevření** - Upozornění bude pípát 10 sekund a pak zazní nepřerušovaný alarm po dobu 3 sekund s varovným světelným indikátorem a alarmem znějícím v aplikaci.

**Aplikace** - Aplikace na Vašem inteligentním zařízení Vás upozorní při výše uvedených situacích. Můžete nastavit alarmy při nižší nebo vyšší teplotě pokožky dítěte, dechové frekvenci a polohy těla.

## 8.10 Světelné indikátory nabíjení

Když je energetický zdroj připojen k nabíječce, rozsvítí se indikátor napájení (14) na nabíječce. Indikátor napájení (14) na nabíječce se nemění podle toho zda je Snuzza Pico nabitý nebo ne.

Zaznamenává pouze, zda je na nabíječce použita energie. Chcete-li zjistit zda se Snuzza Pico nabíjí v nabíjecí stanici, viz předchozí část.

## 8.11 Oblékání

- Snuzza Pico může být připnutý na složený pás pleny nebo na složený pás elastických kalhot.
- Nedoporučuje se nosit oblečení mezi Snuzza Pico a pokožkou.
- Snuzza Pico může být nošen pod oblečením, ale ne na něm.
- Příliš mnoho oblečení může zeslabit nebo utlumit alarm. Ujistěte se, že alarm je slyšet, když je dítě oblečené nebo je pod dekou.

## 9. UPOZORNĚNÍ PROBUZENÍ

Poznámka: Pokud je smartphone připojen, všechny upozornění a alamy, jakož i všechny údaje v reálném čase, jsou viditelné v aplikaci. Během sledování, pokud není detekován pohyb břicha během 15 sekund, Snuzka Pico mírně vibruje ve snaze probudit dítě. Pokud se pohyb břicha obnoví během následujících 5 sekund, indikátor pohybu (21) bude blikat červeným světlem při každém dalším břišním pohybu jako indikace, že během 15 sekund nedošlo k žádnému pohybu. Pokud je povoleno Upozornění probuzení, po 3 takových vibracích úspěšných probouzecích pokusech, světelný indikátor pohybu (21) bude blikat červené světlo každé 2 sekundy současně s pípáním. To Vás upozorní na skutečnost, že Vaše dítě přestalo dýchat po dobu 15 sekund třikrát po sobě a pak pokračovalo v dýchání na základě vibrace Snuzka Pico. Poznámka: Monitorování pokračuje během oznámení Upozornění probuzení. Upozornění probuzení se automaticky zapne při každém zapnutí Snuzka Pico.

## 10. BATERIE

### 10.1 Indikátor baterie

Pokud se baterie během monitorování vybité, kontrolka stavu baterie (1) bude blikat následovně:-

Indikátor baterie (1) bude blikat červeně každých 5 sekund spolu s krátkým pípnutím každých 60 sekund. Když se stav baterie stane kritickým, pípání se zrychlí na pípnutí jednou za 10 sekund. Nabíjte baterii ještě před dalším použitím (viz část 10.3. Nabíjení baterie). Pípnutí může být ztlumeno stisknutím tlačítka napájení / režimu.

## 10.2 Životnost baterie

Snuza Pico má dobíjecí baterii a vydrží na jedno nabití přibližně dva týdny. Životnost baterie závisí na používání.

# 11. ÚDRŽBA

## 11.1 Likvidace

Přístroj a obalový materiál musí být zlikvidován v souladu s právními předpisy země, které upravují likvidaci a recyklaci baterií.

## 11.2 Čištění a údržba

- Na odstranění nečistot jemně otřete vlhkým hadříkem. Trochu mýdla můžete použít na tvrdé nečistoty.
- Nepoužívejte hygienické přípravky, které mohou obsahovat nebezpečné chemikálie.
- Monitor je odolný vůči stříkající vodě, není vodotěsný. Neponořujte ho do vody. Pokud se namočí, ihned ho vysušte.
- Během přenášení držte Snuza Pico v ochranném obalu. Neukládejte Snuza Pico do nabíjecího pouzdra na delší dobu než je nezbytné nebo do vlhkého prostředí.
- Pro prodloužení životnosti baterie:-
  - Před dlouhodobým uskladněním Snuza Pico plně nabít.
  - Nenechávejte Snuza Pico zcela vybitý a aby nezůstával vybitý vícekrát dlouhodobě.
  -

## 12. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- 12.1 Zkontrolujte nesprávnou montáž a umístění Snuza Pico na dětskou plenu (viz část 5 Montáž na plenu a část 7 Montáž Snuza Pico).
- 12.2 Selhání baterie. Světelný indikátor baterie (1) bude svítit červeně.

Pro více informací navštivte naši webovou stránku [www.snuza.com](http://www.snuza.com).

## 13. ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Zákazníci tento monitor používají na své vlastní riziko a společnost Snuza International (Pty) Ltd, její členové, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé, výrobci, distributoři a spolupracovníci ("Snuza") nenesou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu zákazníkem nebo jinou osobou, která vznikla nebo souvisí s používáním nebo výrobou monitoru včetně ztráty, poškození nebo zranění, které utrpěl zákazník nebo jakákoli jiná osoba v důsledku jakýchkoli chyb v souvislosti s monitorem a všechny záruky a jakákoli jiná odpovědnost z jakékoliv příčiny, která vznikla, jsou tímto vyloučeny a zákazník tímto odškodní společnost Snuza International (Pty) Ltd, pokud jde o jakoukoli takovou zodpovědnost.

## 14. GARANCE

Společnost Snuza International (Pty) Ltd zaručuje, že tento výrobek neobsahuje chyby v materiálech a zpracování po dobu 12 měsíců od původního data koupě, který je ověřeným dokladem o prodeji. Závazek záruky je omezen na bezplatnou výměnu jednotky a nezahrnuje náklady na dopravu. Naše záruka se vztahuje na všechny země, ve kterých je tento výrobek dodáván. Zákonem o provozování tohoto produktu uživatel přijímá veškerou výslednou zodpovědnost. vyhrazujeme si právo upravit ustanovení této záruky kdykoli bez upozornění. Tato záruka se nevztahuje na baterii, nesprávnou aplikaci, poškození, nesprávné použití nebo poškození při přepravě.

## 15. INFORMACE

### **Prohlášení o shodě FCC pro Snuza Pico a nabíjecí stanici:-**

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení by nemělo způsobovat škodlivé rušení;
  - (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení.
- Toto zařízení splňuje požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření ve veřejném nebo nekontrolovaném prostředí.

### **Kanadské regulační prohlášení pro Snuza Pico a nabíjecí stanici:-**

Toto zařízení je v souladu s normami RSS na vynětí licencí Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:





- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení;
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz přístroje.




**CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky na vystavení rádiovým frekvencím v souladu s RSS-102 vydání 5 pro přenosné podmínky používání.

## 16. TECHNICKÉ PARAMETRY

	Příložná část typu BF
	Označení CE podle CE 1999/5 / EC, 2001/95 / EC, 89/336 / EEC (TV Rheinland)
	Označení FCC podle Federální komunikační komise - USA
IC: 21736-01	Toto zařízení je v souladu s průmyslovými kanadskými licenčními normami RSS
IP52	Kryt monitoru je chráněn proti vniknutí kapající vody
	Sériové číslo zařízení (první dvě čísla určují stáří)

	<p>Informace o správné likvidaci monitoru naleznete v části Likvidace</p>
<p>Obvyklá životnost</p>	<p>Snuza Pico má předpokládanou životnost 5 let od data výroby</p>
<p>Environmentální podmínky</p>	<p>Přípustné provozní podmínky prostředí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota: od 5 ° až do 40 °</li> <li>• Vlhkost: 15% až 93%, bez kondenzace</li> <li>• Tlak vzduchu: 700 HPA do 1060 HPA</li> </ul>
<p>Přípustné podmínky prostředí přepravy a skladování po vyjmutí zařízení z jeho ochranného obalu a následnýmii způsobu použití</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25°C bez kontroly relativní vlhkosti; a</li> <li>• +70°C při relativní vlhkosti až do 93%, bez kondenzace</li> </ul>
<p>Zdroj energie</p>	<p>Interně napájené</p>
<p>Specifikace baterie</p>	<p>Lithiový polymer</p>
<p>Hladina akustického tlaku</p>	<p>85dBm na 10 cm</p>

## Kontaktujte nás:

Pokud potřebujete pomoc s používáním nebo údržbou Snuza Pico nebo nahlásit neočekávaný provoz nebo událost, kontaktujte nás prostřednictvím:

Internet: [www.snuza.com/contact.php](http://www.snuza.com/contact.php)  
Email: [support@at.snuza.com](mailto:support@at.snuza.com)  
Telefon: +27 (0)21 461 8530  
Fyzicky: Unit 11 Roeland Square, Roeland Street, Cape Town  
8001, Jižní Afrika