

snúza®

PICO

Smart Wearable Monitor

Inteligentný prenosný monitor

MANUÁL S INŠTRUKCIAMI

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE INŠTRUKCIE



DÔLEŽITÉ

Snuza Pico je pomôcka pri starostlivosti o dieťa, nie je zdravotnícka pomôcka. **Neslúži na určenie diagnózy, ani ako prevencia alebo prístroj na monitoring choroby, zranenia alebo hendikepu. Nevhodný na použitie pri spoločne spiacich deťoch**

SNUZA je registrovaná ochranná známka



Snuza International (Pty) Ltd

Unit 11 Roeland Square

Roeland Street

Kapkaupunki 8001

Južná Afrika



FCC ID: 2AI3601

IC: 21736-01

Vyrobené v Južnej Afrike

Patentované

OBSAH

1.	DÔLEŽITÉ - PREČÍTAŤ AKO PRVÉ!	1
2.	Úvod	3
3.	Bezpečnostné opatrenia a kontraindikácie	5
4.	Identifikácia častí	6
5.	Spríevodca rýchlym štartom	8
6.	Montáž na plienku	10
7.	Montáž Snuzo Pico	10
8.	Manipulácia	11
	8.1 Pripnutie na plienku	11
	8.2 Zapnutie/vypnutie	12
	8.3 Pauza	12
	8.4 Nabíjanie	12
	8.5 Svetelné indikátory	13
	8.6 Svetelný indikátor pohybu	14
	8.7 Bluetooth s nízkou energiou	14
	8.8 Indikátory baterky	15
	8.9 Indikátory alarmu	15
	8.10 Indikátory nabíjania	16
	8.11 Obliekanie	16
9.	Upozornenie prebudenia	17
10.	Batéria	17
	10.1 Indikátor batérie	17
	10.2 Životnosť batérie	18
11.	Obsluha/údržba	18
	11.1 Likvidácia	18
	11.2 Čistenie a skladovanie	18


12. Riešenie problémov	19
13. Zrieknutie sa zodpovednosti.....	19
14. Garancia	20
15. Regulačné informácie	20
16. Technické parametre.....	22

1. DÔLEŽITÉ - PREČÍTAŤ AKO PRVÉ!

Snuza Pico je navrhnutá tak, aby sa dala pripnúť na plienku počas spánku, takže frekvencia pohybu bruška dieťaťa, telesná teplota a pozícia tela môžu byť neustále monitorované a informácie sú zdieľané do Vášho smart zariadenia cez Bluetooth Low Energy technológiu.

**** Každé zariadenie je limitované na 4 užívateľov, ktorí môžu byť registrovaní na jedno inteligentné zariadenie.**

**** Iba jedno zariadenie môže byť pripojené na Snuza Pico v jednom čase.**

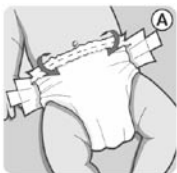

VŽDY:

Používajte správnu veľkosť plienky pre zabezpečenie správnosti upevnenia Snuza Pico na plienke.



Sklopte hornú časť plienky pred pripojením Snuza Pico, aby ste zaistili pevnú príľnavosť. Pritiahnutím oboch strán plienky zabezpečíte príľnavosť a bezpečnosť upevnenia plienky okolo bruška.

Ak chcete upevniť Snuza Pico, zdvihnite prednú páčku aby ste uvoľnili klip.

Umiestnite klip okolo zloženej plienky do plného dosahu klipu. Zatvorte klip a zaklapnite prednú páčku. Presvedčte sa, že klip je správne zatvorený a dobre sedí na plienke.

Pre začatie monitorovania stlačte tlačidlo pre zapnutie. Zvukový signál naznačuje, že Snuzza Pico sa zaplo. Prihláste sa do aplikácie na svojom inteligentnom zariadení. Snuzza Pico sa zosynchronizuje s aplikáciou na inteligentnom zariadení a dáta sa zobrazia na hlavnej obrazovke. (Poznámka: stlačte na svojom inteligentnom zariadení tlačidlo obnovenia, ak sa nesynchronizujú automaticky).

Pre presné informácie o polohe prejdite na stránku s nastaveniami v aplikácii a uveďte kde je monitor Snuzza Pico pripojený na plienku. Uistite sa, že Snuzza Pico sedí priamo na plienku.



Vždy dodržiavajte vyššie uvedený postup, aby ste sa uistili, že brušný pohyb dieťaťa je monitorovaný.

POZNÁMKA:

So Snuzza Pico zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli poškodeniu klipu a vždy ho uložte do nabíjacej základne počas cestovania.

2. ÚVOD



Účel použitia:

Snuza Pico je prenosný monitor brušného pohybu ktorý bezpečne a pohodlne sníma pohyb bruška Vášho dieťaťa počas spánku.

Určené pre používateľa:

Toto zariadenie je určené na obsluhu starostlivosti o dieťa. Opatrovateľka musí ovládať pokyny pre bezpečnosť z používateľskej príručky.

Prostredie:

Bezpečie domova

Snuza Pico bezpečne a pohodlne sleduje pohyb bruška Vášho dieťaťa počas spánku, aby poskytol možnosť včasného zásahu v prípade, ak sa pohyb bruška zastaví.

Snuza Pico kiinnitetään klipsillä vauvasi vaippaan, joten se on täysin kannettava. Se ei vaadi johtoja, piuhoja, anturityynyjä tai ulkoista virtälähdettä.

Snuza Pico by mal byť pripnutý na plienku Vášho dieťaťa s presnosťou. Nie sú potrebné žiadne káble, drôty, senzorové podložky alebo externé napájanie.

Snuza Pico nie je vhodné na používanie pri spolu spiacich deťoch.

Snuza Pico dokáže rozpoznať aj najmenší pohyb bruška a upozorní Vás, ak sa pohyb bruška zastaví na 20 sekúnd. Snuza Pico bude najprv jemne vibrovať po 15 sekundách v snahe prebudiť dieťa.

Ak sa vibráciami podarí zobudiť dieťa a vyvolať dýchanie, Snuza Pico bude pokračovať v sledovaní pohybu. Po troch udalostiach s vibráciami Vás Upozornenie prebudenia upozorní na skutočnosť, že brušné pohyby dieťaťa sa zastavili trikrát po dobu 15 sekúnd. Výstraha Prebudenie sa vyznačuje krátkym pípnutím a blikaním žltého indikátora pohybu (1) každé 2 sekundy. Monitorovanie bude pokračovať aj keď je aktivované Upozornenie prebudenia, ale bude vyžadovať, aby ošetrojúci pracovník dieťa sledoval. Výstražný alarm prebudenia možno obnoviť krátkym vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia. Funkcia Upozornenia prebudenia môže byť zakázaná v aplikácii smartfónu. Každých 15 sekúnd Upozornenie prebudenia budú zaznamenávané v aplikácii telefónu.

Snuza Pico bude vždy merať pozíciu tela Vášho dieťaťa a jeho telesnú teplotu.

3. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A KONTRAINDIKÁCIE

- Toto zariadenie nie je určené na prevenciu alebo monitorovanie choroby alebo stavu, ako je obštrukčná apnoe.
- Pohyb z vonkajšieho prostredia, ako je napríklad vozenie dieťaťa v kočíku, cestovanie vo vozidle alebo v lietadle môže byť zaznamenané snímačom Snuza Pico. Výsledky Snuza Pico môžu ovplyvniť zdroje pohybu zaznamenané z externého prostredia.
- Monitorované dieťa musí spať vo svojej vlastnej postielke, kde monitor nebude môcť zaznamanávať brušný pohyb druhého dieťaťa uloženého v zdieľanej postielke a nebude zaznamanávať tieto pohyby.
- Rádiové vysielacie, ako sú mobilné telefóny, audio a video detské monitory, bezdrôtové telefóny, vysielачky, bezdrôtové smerovače atď. môžu ovplyvniť schopnosť monitoru zaznamenať pohyb. Monitor by nemal byť umiestnený do vzdialenosti viac ako 2 metre od ostatných prenosných zariadení alebo elektrických káblov.
- Žiadna modifikácia tohto zariadenie nie je povolená.
- Jedno zariadenie je odporúčané používať iba pre jedno dieťa.
- Malé časti, ktoré sa z nepravdepodobného dôvodu oddelili, môžu mať za následok vzniknutie nebezpečenstva udusenía.
- V prípade, že Vaše dieťa je citlivé na pokožke, ak sa zariadenie dostane do kontaktu s pokožkou, pozrite časť 8.3. Ak citlivosť pokožky pretrváva, kontaktujte nás na adrese www.snuza.com.
- Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat, škodcov a iných detí, pretože poškodenie prístroja by mohlo spôsobiť, že nebude fungovať tak, ako je určené.
- Nevkladajte nič do otvoru určeného na prenos zvuku (5).
- Zabezpečte, aby sa žiadna tekutina nedostala do otvoru určeného na prenos zvuku.
- Nepoužívajte neprimeranú silu na ohnutie/otvorenie/zatvorenie svorky (11).

4. IDENTIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZARIADENIA



Predná strana

- 1 - Kontrolka batérie
- 2 - Kontrolka pohybu (dychovej frekvencie)
- 3 - Kontrolka alarmu
- 4 - Kontrolka oznámení a bluetooth
- 5 - Otvory reproduktora
- 6 - Vypínač / tlačidlo režimu
- 7 - Páka klipu



Zadná strana

- 8 - Bezkontaktný senzor
- 9 - Kolíky nabijania
- 10 - Teplotný senzor
- 11 - Klip



Nabíjacie púzdro

- 12 - Nabíjací kábel
- 13 - Kontrolka napájania
- 14 - Nabíjacia základňa

5. SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

Krok 1: Nabite svoj Snuza Pico

Pripojte napájací kábel do nabíjacej skrinky. Uistite sa, že Snuza Pico sedí na nabíjacej skrine a zavrite viečko krytu. Nechajte svoj Snuza Pico nabíjať 1 hodinu.

Krok 2: Stiahnite si aplikáciu Snuza Pico pre pripojenie

Snuza Connect je dostupná na iOS a Android.

Pozrite si iOS sprievodcu aplikáciou: <http://www.snuza.com/manuals/>

Pozrite si Android sprievodcu aplikáciou: <http://www.snuza.com/manuals/>

Minimálne požiadavky na inteligentné zariadenie:

- Musí podporovať:
- Bluetooth 4.0
 - Apple zariadenia: iOS 8.0 alebo novšie
 - Android zariadenia: Android 4.4 alebo novšie

Krok 3: Registrácia Snuza Pico

Navštívte connect.snuza.com. Vyberte možnosť registrácie nového užívateľa a vyplňte požadované políčka.

Potvrzovací e-mail bude odoslaný na Vašu vybranú e-mailovú adresu.

Po potvrdení sa dostanete na portál Snuza. Prejdite na kartu "Registrácia zariadenia" v ponuke.

Vložte sériové číslo Vášho zariadenia a vyplňte požadované polia s podrobnosťami. Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane Snuza Pico alebo na obale Snuza Pico.

Krok 4: Pripevnenie Snuza Pico

Preložte okraj plienky.

Zdvihnite klip pre uvoľnenie a umiestnite Snuza Pico na plienku Vášho dieťaťa. Presvedčte sa, že je klip správne zatvorený po umiestnení.

Krok 5: Zapnite Váš Snuzza Pico & začatie monitorovania

Zapnite Snuzza Pico zatlačením tlačítka pre zapnutie až kým nebudete počuť štartovací zvuk a všetky svetelné indikátory nezačnú súčasne blikať.

Okamžite po začiatocnej sekvencii indikátor batérie začne blikať na zeleno, čo bude znamenať, že je batéria plne nabitá.

Zosynchronizujte Vaše inteligentné zariadenie so Snuzza Pico jednoduchým stlačením tlačidla pre obnovenie na obrazovke aplikácie. Teraz môžete začať monitorovať Vaše dieťa cez Váš telefón.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE SNUZZA PICO

Svetlo pre identifikáciu pohybu začne blikať vždy keď zaznamená pohyb. Pokiaľ v priebehu 15 sekúnd nie je zaznamenaný žiadny pohyb, Snuzza Pico začne vibrovať pre vzbudenie dieťaťa.

Pokiaľ počas nasledujúcich 5 sekúnd nie je zaznamenaný pohyb, Snuzza Pico spustí zvukový alarm.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE SNUZZA CONNECT APLIKÁCIE


Snuzza Connect aplikácia je navrhnutá tak, aby Vám prinášala informácie o frekvencii dychu Vášho dieťaťa, pozícií tela, teplote pokožky, detekciu pádu, úroveň batérie a upozorní Vás keď je klip na Snuzza Pico otvorený. Prispôsobte si svoje upozornenia podľa seba v aplikácii.

Upozornenia v aplikácii môžu byť zamietnuté pohybom zľava doprava. Nezahrňuje to frekvenciu pohybu bruška a detekciu pádu. Tieto upozornenia môžu byť zrušené stlačením tlačidla pre zapnutie na zariadení.

Uistite sa že Váš smartfón je pripojený k aplikácii aby ste dostávali všetky notifikácie a upozornenia.

6. PRIPEVNEIE NA PLIENKU

Dôležité: Správne upevnenie plienky je dôležité pre správnu funkciu Snuza Pico. Vrchná tenká časť plienky musí byť preložená ponad hrubšiu časť plienky predtým, než je plienka upevnená (časť, v ktorej bude Snuza Pico pripevnené). Plienka by mala pohodlne sedieť na dieťaťi s vrchným okrajom plienky tesne pod detským pupkom. Voľne pripevnená plienka spôsobí, že monitor stratí kontakt s dieťaťom a vyvolá planý poplach. Veľmi "plná" alebo mokrá plienka môže tiež spôsobiť stratu kontaktu monitoru s dieťaťom. Ak dieťa spí na svojej strane, Snuza Pico by mal byť umiestnený mimo od centra pupka a matraca.

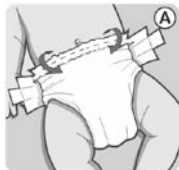

7. MONTÁŽ SNUZA PICO

Pri pripájaní monitoru Snuza Pico by ste mali položiť prsty medzi plienku a pokožku dieťaťa. Uistite sa, že monitor pripínate na plienku v dostatočnej vzdialenosti od pokožky dieťaťa, aby nedošlo k ublíženiu dieťaťu pri zaklápaní.

Otvorte klip Snuza Pico do plného rozsahu. Uvoľníte tým sponu do plného rozsahu. Umiestnite monitor cez zložené plienky do plného rozsahu spony. Zatvorte klip a zatlačte blokovaciu páčku tak, ako je to zobrazené tu:

Uistite sa, že je Snuza Pico v kontakte s detským bruškom v oblasti pupku, hoci bližšie k bokom môže vyhovovať rôznym spánkovým pozíciám.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby deti spali na chrbte, pokiaľ lekár nepovie inak: <http://www.who.int/en/>

8. MANIPULÁCIA

8.1 Pripnutie na plienku

Pri pripieňovaní Snuzza Pico by ste mali položiť prsty medzi plienku a pokožku dieťaťa. Uistite sa, že monitor pripínate bezpečne na plienku a v bezpečnej vzdialenosti od pokožky dieťaťa, aby ste pri pripínaní nezranili dieťaťko.

Otvorte klip Snuzza Pico do plného rozsahu. Uvoľníte tým sponu do plného rozsahu. Umiestnite monitor cez zloženú plienku do plného rozsahu spony. Zatvorte klip a zatlačte blokovaciu páčku tak, ako je to zobrazené tu:



Uistite sa, že je Snuzza Pico v kontakte s detským bruškom v oblasti pupku, hoci bližšie k bokom, môže vyhovovať rôznym spánkovým pozíciám.

Umiestnite na bruško pri deťoch spiacich na chrbte.

Umiestnite na bočnú stranu bruška pre deti spiace na brušku.

Snuzza Pico má zabudovaný alarm, ktorý indikuje, či bol klip otvorený počas používania. Predtým, ako sa spustí alarm, Snuzza Pico bude pomaly pípať po dobu 7 sekúnd, aby Vás upozornil, aby ste ho vypli alebo aktivovali funkciu pauzy. Ak klip zostane

otvorený po dobu ďalších 3 sekúnd, aktivuje sa funkcia Clip Open Alarm.

8.2 Zapnutie/vypnutie

Snuza Pico môže byť zapnutý krátkym stlačením tlačidla pre zapínanie (6) a pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo pre zapínanie (6) na 2 sekundy. Budete počuť zvuky zapnutia a vypnutia (pozri bod 8.5).

Alternatívne môže byť Snuza Pico zapnutý a vypnutý priamo z aplikácie (ak táto možnosť bola nastavená priamo v nastaveniach aplikácie). To Vám umožní pohodlné zapnutie, ak ste na to zabudli a už pripevnili monitor k plienke, bez toho, aby ste rušili svoje dieťa.

8.3 Pauza

Snuza Pico bol navrhnutý tak, aby monitoroval pohyb dieťaťa, teplotu pokožky a pozíciu tela počas spánku. Aby ste zabránili falošným poplachom počas doby, keď Vaše dieťa nespí (počas dojčenia, výmeny plienky atď.), funkcia "Pozastaviť" Vám umožní dočasne pozastaviť monitorovanie, ktoré je používateľom nastaviteľné (v aplikácii) v čase, napríklad počas dojčenia alebo výmeny plienky.

Táto funkcia pozastavenia môže byť aktivovaná priamo z aplikácie stlačením tlačidla "Pozastaviť".




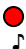
8.4 Nabíjanie

Púzdro na prenášanie Snuza Pico (12) je súčasne napájacia nabíjačka, ktorá dobíja zabudovanú batériu tak, že sa monitor Snuza Pico jednoducho umiestni do prenosného púzdra.

8.5 Svetelné indikátory

Spúšťacie a vypínacie sekvencie**Uvedenie do prevádzky pomocou tlačidla pre štart**

Keď je Snuzo Pico zapnutý pomocou tlačidla napájania (6), kontrolky (1, 2, 4, 5) budú blikať v poradí zľava doprava a nasleduje štartovací tón. Bezprostredne po štartovacom tóne indikátor stavu batérie (2) bude blikať, aby signalizoval stav batérie pri jej zapnutí. Indikátor batérie má nasledujúci význam:

	Zelená	Batéria je plne nabitá
	Žltá	Batéria je slabá, ale vydrží ešte ďalších pár hodín
	Červená	Batéria je veľmi slabá a mala by byť nabitá
	Červená a následne tón vypnutia	Batéria je vybitá a Snuzo Pico sa automaticky vypne. Nabíjajte ihneď

Uvedenie do prevádzky pomocou aplikácie

Keď je Snuzo Pico zapnutý pomocou aplikácie, nezaznie žiadny zvukový tón, ale zvyčajne sa vyskytne blikajúca sekvencia bežného indikátora spustenia.

Informácie o batérii sa zobrazujú na obrazovke aplikácie, takže nie je potrebné sledovať batériu počas diaľkového spustenia.

Vypnutie pomocou tlačidla




Keď je Snuzo Pico vypnutý pomocou tlačidla, kontrolky začnú blikať v poradí sprava doľava, po ktorom nasleduje vypínací tón.

Vypnutie pomocou aplikácie

Keď je Snuza Pico vypnutý pomocou aplikácie, nenasleduje žiadna zvuková signalizácia vypnutia, ale ukáže sa typická sekvencia blikajúcich indikátorov pre vypnutie.




8.6 Svetelný indikátor pohybu

Pri spustení - ako bolo vysvetlené vyššie v sekcii "Spúšťacie a vypínacie sekvencie":-

	Zelená	Zaznamenaný silný brušný pohyb
	Žltá	Zaznamenaný slabý brušný pohyb
	Červená	Zaznamenaný veľmi slabý brušný pohyb

8.7 Bluetooth Low Energy

Svetelný indikátor Bluetooth (4):

	Modro	Zasvieti na modro každé 2 sekundy ak je pripojený na Váš smartfón/tablet
	Ružová	Zasvieti na ružovo každé dve sekundy počas pauzy
	Blikajúca ružová	Bliká 6-krát hneď po spustení, čo naznačuje, že na serveri je dôležité upozornenie, ktoré si vyžaduje Vašu pozornosť. Túto dôležitú správu zobrazíte prihlásením sa do svojho účtu na portáli Snuza Connect (connect.snuza.com)

8.8 Indikátory batérie

Pri spustení - ako bolo vysvetlené vyššie v sekcii "Spúšťacie a vypínacie sekvencie".

Ak je úroveň nabitia batérie nízka (keď je Snuz a Pico zapnutý)

Svetelný indikátor batérie bude blikať na červeno každých 5 sekúnd a bude pípať dvakrát každých 60 sekúnd.

Ak je úroveň batérie kritická (keď je Snuz a Pico zapnutý)

Svetelný indikátor batérie bude blikať na červeno každých 5 sekúnd a pípať každých 10 sekúnd.

Keď sa nabíja

Počas nabíjania bude svetelný indikátor batérie blikať nazeleno. Keď je nabíjanie ukončené, svetelný indikátor batérie na Snuz a Pico bude mať konštantnú zelenú farbu.

8.9 Indikátory alarmu

Dýchanie sa zastavilo - Snuz a Pico spustí alarm a súčasne začne blikať svetelný indikátor (3). V aplikácii bude tiež znieť alarm.

Voľný pád - Snuz a Pico spustí alarm a súčasne začne blikať svetelný indikátor (3). V aplikácii bude tiež znieť alarm.

Systémová porucha - Snuz a Pico bude vydávať nízko frekvenčný alarm na zariadení a v aplikácii.

Klip (7) alarm pri otvorení - Upozornenie bude pípať 10 sekúnd a potom zaznie neprerušený alarm po dobu 3 sekúnd s varovným svetelným indikátorom a alarmom znejúcim v aplikácii.

Aplikácia - Aplikácia na Vašom inteligentnom zariadení Vás upozorní pri vyššie uvedených situáciách. Môžete nastaviť alarmy pri nižšej alebo vyššej teplote pokožky dieťaťa, dychovej frekvencii a polohy tela.

8.10 Svetelné indikátory nabíjania

Keď je energetický zdroj pripojený k nabíjačke, rozsvieti sa indikátor napájania (14) na nabíjačke. Indikátor napájania (14) na nabíjačke sa nemení podľa toho či je Snuzka Pico nabitý alebo nie. Zaznamenáva iba či je na nabíjačku použitá energia. Ak chcete zistiť či sa Snuzka Pico nabíja v nabíjacej stanici, pozrite si predchádzajúcu časť.

8.11 Obliekanie

- Snuzka Pico môže byť pripnutý na zložený pás plienky alebo na zložený pás elastických nohavíc.
- Neodporúča sa nosiť oblečenie medzi Snuzka Pico a pokožkou.
- Príliš veľa oblečenia môže zoslabiť alebo utlmiť alarm. Uistite sa, že alarm je počuť, keď je dieťa oblečené alebo je pod dekou.

9. UPOZORNENIE PREBUDENIA

Poznámka: Keď je smartfón pripojený, všetky upozornenia a alarmy, ako aj všetky údaje v reálnom čase, sú viditeľné v aplikácii. Počas sledovania, ak nie je detekovaný pohyb bruška počas 15 sekúnd, Snuza Pico mierne vibruje v snahe prebudiť dieťa. Ak sa pohyb bruška obnoví v priebehu nasledujúcich 5 sekúnd, indikátor pohybu (21) bude blikať červeným svetlom pri každom ďalšom brušnom pohybe ako indikácia, že počas 15 sekúnd nedošlo k žiadnemu pohybu. Ak je povolené Upozornenie prebudenia, po 3 takýchto vibráciách úspešných prebúdzacích pokusoch, svetelný indikátor pohybu (21) bude blikať červené svetlo každé 2 sekundy súčasne s pípaním. To Vás upozorní na skutočnosť, že Vaše dieťa prestalo dýchať po dobu 15 sekúnd trikrát po sebe a potom pokračovalo v dýchaní na základe vibrácie Snuza Pico. Poznámka: Monitorovanie pokračuje počas oznámenia Upozornenia prebudenia. Upozornenie prebudenia sa automaticky zapne pri každom zapnutí Snuza Pico.

10. BATÉRIA

10.1 Indikátor batérie

Ak sa batéria počas monitorovania vybije, kontrolka stavu batérie (1) bude blikať nasledovne:-
Indikátor batérie (1) bude blikať na červeno každých 5 sekúnd spolu s krátkym pípnutím každých 60 sekúnd. Keď sa stav batérie stane kritickým, pípanie sa zrýchli na pípnutie raz za 10 sekúnd. Nabite batériu ešte pred ďalším použitím (pozrite časť 10.3. Nabíjanie batérie). Pípnutie môže byť stíšené stlačením tlačidla napájania/režimu.

10.2 Životnosť batérie

Snuza Pico má nabíjateľnú batériu a vydrží na jedno nabitie približne dva týždne. Životnosť batérie závisí od používania.

11. ÚDRŽBA

11.1 Likvidácia

Prístroj a obalový materiál musia byť zlikvidované v súlade s právnymi predpismi krajiny, ktoré upravujú likvidáciu a recykláciu batérií.

11.2 Čistenie a údržba

- Na odstránenie nečistôt jemne utrite vlhkou handričkou. Trochu mydla môžete použiť na tvrdé nečistoty.
- Nepoužívajte hygienické prípravky, ktoré môžu obsahovať nebezpečné chemikálie.
- Monitor je odolný voči striekajúcej vode, nie je vodotesný. Neponárajte ho do vody. Ak sa namočí, ihneď ho vysušte.
- Počas prenášania držte Snuza Pico v ochrannom obale. Neukladajte Snuza Pico do nabíjacieho púzdra na dlhší čas ako je potrebné alebo do vlhkého prostredia.
- Na predĺženie životnosti batérie:-
 - Pred dlhodobým uskladnením Snuza Pico plne nabite.
 - Nenechávajte Snuza Pico úplne vybitý a aby nezostával vybitý viackrát dlhodobo.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

- 12.1 Skontrolujte nesprávnu montáž a umiestnenie Snuza Pico na destku plienku (viď časť 5 Montáž na plienku a časť 7 Montáž Snuza Pico).
- 12.2 Zlyhanie batérie. Svetelný indikátor batérie (1) bude svietiť načerveno.

Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku www.snuza.com.

13. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Zákazníci tento monitor používajú na svoje vlastné riziko a spoločnosť Snuza International (Pty) Ltd, jej členovia, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia, výrobcovia, distribútori a spolupracovníci ("SNUZA") nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu zákazníkom alebo inou osobou, ktorá vznikla alebo súvisí s používaním alebo výrobou monitora vrátane straty, poškodenie alebo zranenia, ktoré utrpel zákazník alebo akákoľvek iná osoba v dôsledku akýchkoľvek chýb v súvislosti s monitorom a všetky záruky a akákoľvek iná zodpovednosť z akejkoľvek príčiny, ktorá vznikla, sú týmto vylúčené a zákazník týmto odškodní spoločnosť Snuza International (Pty) Ltd, pokiaľ ide o akúkoľvek takúto zodpovednosť.

14. GARANCIA

Spoločnosť Snuzá International (Pty) Ltd zaručuje, že tento výrobok neobsahuje chyby v materiáloch a spracovaní po dobu 12 mesiacov od pôvodného dátumu kúpy, ktorý je overeným dokladom o predaji. Závazok záruky je obmedzený na bezplatnú výmenu jednotky a nezahŕňa náklady na dopravu. Naša záruka sa vzťahuje na všetky krajiny, v ktorých je tento výrobok dodávaný. Zákomom o prevádzkovaní tohto produktu používateľ prijíma všetku výslednú zodpovednosť. Vyhradzujeme si právo upraviť ustanovenia tejto záruky kedykoľvek bez upozornenia. Táto záruka sa nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, poškodenie, nesprávne použitie alebo poškodenie pri preprave.

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Vyhlasenie o zhode FCC pre Snuzá Pico a nabíjaciu stanicu:-

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie by nemalo spôsobovať škodlivé rušenie;
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia ktoré môžu spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky FCC na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu vo verejnom alebo nekontrolovanom prostredí.

Kanadské regulačné vyhlásenie pre Snuzá Pico a nabíjaciu stanicu:-



Toto zariadenie je v súlade s normami RSS na vyňatie licencií Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:


- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku prístroja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám v súlade s RSS-102 vydanie 5 pre prenosné podmienky používania.

16. TECHNICKÉ PARAMETRE

	Aplikovaná časť typu BF
	Označenie CE podľa CE 1999/5/EC, 2001/95/EC, 89/336/EEC (TV Rheinland)
	Označenie FCC podľa Federálnej komunikačnej komisie – USA
<p>IC: 21736-01</p>	Toto zariadenie je v súlade s kanadskými priemyselnými licenčnými normami RSS
<p>IP52</p>	Kryt monitora je chránený proti vniknutiu kvapkajúcej vody
	Sériové číslo zariadenia (prvé dve čísla určujú rok výroby)

	<p>Informácie o správnej likvidácii monitora nájdete v časti Likvidácia</p>
<p>Zvyčajná životnosť</p>	<p>Snuza Pico má predpokladanú životnosť 5 rokov od dátumu výroby</p>
<p>Environmentálne podmienky</p>	<p>Prípustné prevádzkové podmienky prostredia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota: od 5° až do 40° • Vlhkosť: 15% až 93%, bez kondenzácie • Tlak vzduchu: 700 HPA do 1060 HPA
<p>Prípustné podmienky prostredia prepravy a skladovania po vybratí zariadenia z jeho ochranného obalu a následnými spôsobmi použitia:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 25°C bez kontroly relatívnej vlhkosti; a • +70°C pri relatívnej vlhkosti až do 93%, bez kondenzácie
<p>Zdroj energie</p>	<p>Interne napájané</p>
<p>Špecifikácia batérie</p>	<p>Lítiový polymér</p>
<p>Hladina akustického tlaku</p>	<p>85dBm na 10 cm</p>

Kontaktujte nás:

Ak potrebujete pomoc s používaním alebo údržbou Snuza Pico alebo nahlásiť neočakávanú prevádzku alebo udalosti, kontaktujte nás prostredníctvom:

Internet: www.snuza.com/contact.php
Email: support@snuzacom
Telefón: +27 (0)21 461 8530
Fyzicky: Unit 11 Roeland Square, Roeland Street, Cape Town
8001, Južná Afrika